

Brukerveiledning

TECH TALK™ - 8 felter x 8 nivåer



TECH TALK™ kommunikasjons hjelpemiddel	1
Egenskaper.....	2
Innstillinger.....	2
Innsetting av batterier	2
Innspilling	3
Avspilling.....	3
Utseende og utforming av overlegg.....	3
Slå av apparatet.....	3
Rengjøring av TECH TALK.....	4
Vedlikehold	4

GEWA AS

Postboks 626, 1411 KOLBOTN
Besøksadresse: Trollåsveien 8
Telefon: 66 99 60 00
Telefax: 66 80 94 90
Teksttelefon: 66 80 93 90
E-post: gewa@gewa.no
Website: www.gewa.no

TECH TALK™

Kommunikasjonshjelpemiddel med nivåer.

Egenskaper

TECH TALK er utviklet etter de siste standarder (ISO-9000) slik at apparatet er rustet for fremtiden. Vi stiller full garanti for produktets ytelse i 2 år, inklusiv reparasjoner.

Egenskaper ved produktene i TECH TALK serien:

- Robust konstruksjon; tåler uforsiktig behandling, fall fra bord osv.
- Tåler vann og vanlig rengjøring, lett å holde hygienisk.
- Apparatet er fremstilt av hardfør, støtsikker plastikk.
- Bærbar og lett (900g). Ved levering medfølger en skulderrem.
- Du kan innspille og avspille opptil 64 enkeltbeskjeder fordelt på 8 nivåer, med 8 beskjeder på hvert nivå. Innspillingstiden begrenses automatisk av det innebygde Time-lock systemet.
- Beskjeder kan lagres i apparatet i opptil 100 år uten at det er strøm på batteriene. Batteriene skiftes ved på fjerne platen på undersiden. 4 stk 1,5 V.
- Du kan fremstille utskiftbare overlegg ved hjelp av Mayer-Johnsons **Board Maker™**.

Innstillinger

Alle innstillinger gjøres ved hjelp av brytere på baksiden av apparatene.

TECH TALK er en talemaskin som leveres med 8 eller 32 felter på hvert nivå., hvor brukeren kan spille inn beskjeder. Symboloverleggene kan enkelt skiftes ved å skyve inn nye overlegg mellom tastaturrammen og trykkfeltene. **TECH TALK** er enkel i bruk. Slå først på strømmen til apparatet, tilpass lydstyrken, velg det ønskede lag og trykk så på feltene på forsiden av apparatet for å spille av de lagrede beskjedene.

Innsetting av batterier

1. Sjekk først at apparatet er slått av. Drei volumknappen mot klokken inntil du hører et klikk og strømmen brytes. Hvis du ikke kan dreie knappen mot klokken er apparatet slått av.
2. Snu apparatet rundt slik at baksiden er mot deg og legg apparatet på en stabil overflate.
3. Demonter batteridekslet for å få tilgang til batteriene.
4. Ta ut de gamle batteriene.
5. Sett inn de nye AA-batteriene. NB! Husk å sett dem riktig inn.
6. Sett på batteridekslet ved å legge det slik at det dekker batteriåpningen og trykk det fast. Skru så fast dekslet.

Innspilling

NB! Det er viktig at den innebygde mikrofonen er åpen og uskjermet.

1. Slå på strømmen på apparatet ved å dreie volumknappen med klokken inntil du hører et klikk.
2. Drei volumknappen med klokken inntil du når midtstilling, dvs. ca midt mellom den minimale og den maksimale lydstyrken.
3. Velg det laget du ønsker å spille inn på ved å dreie knappen SELECT LEVEL
4. Trykk den røde innspillingsknappen og hold den inne så lenge du spiller inn.
5. Hold/Trykk deretter inn et av feltene og snakk inn i mikrofonen (foran til høyre). Det beste resultatet oppnås hvis du holder mikrofonen i en avstand på 6 – 12 cm fra munnen.

For å spille inn på de resterende feltene brukes den ovennevnte prosedyren fra 1-5.

Avspilling

Hvis du ønsker en utvendig høyttaler, skal du først kople den til kontakten med påskriften EXT SPK bak på apparatet og deretter utføre punkt 1 til 4:

1. Slå på strømmen på apparatet ved å dreie volumknappen med klokken inntil du hører et klikk.
2. Drei volumknappen med klokken inntil du når midtstilling, dvs. ca midt mellom den minimale og den maksimale lydstyrken.
3. Velg det laget du ønsker å spille av ved å dreie knappen SELECT LEVEL.
4. Velg et av feltene på apparatets overside for å spille av innholdet.

Utseende og utforming av overlegg

Det er flere metoder du kan bruke når du ønsker å fremstille overlegg til **TECH TALK**.

Mulighetene omfatter bl.a.:

1. Tegn eller skriv ut symboler på et Legal (8,5" x 14" = 216 mm x 355 mm) eller A3 papir. Plasser symbolene på papiret slik at de passer til inndelingen på **TECH TALK** apparatet.
2. Fremstill dine overlegg ved å benytte BOARDMAKER™ eller lignende programmer.
 - a. Sett inn CD'en som følger med talemaskinen inn i maskinen
 - b. Lukk informasjonsbildet som kommer opp hvis CD-stasjonen er satt til autostart.
 - c. Under følgende katalog på CD'en finner du Boardmaker-malene (som er de malene som er vedlagt Tech Talk):

\Contents\AMDI\Templates\PC Templates

Pass på at du bruker/åpner de malene som er riktige til DIN Tech Talk!

Slå av apparatet

TECH TALK vil automatisk redusere belastningen av batteriene når det ikke spilles av eller inn beskjeder, men du bør alltid slå av apparatet hvis det blir stående i over 2-3 timer uten at det er i bruk.

Rengjøring av TECH TALK

ADVARSEL! Apparatet må ikke senkes ned i vann og det må ikke trenge vann inn gjennom høyttalerhullene eller via de andre kontaktene. **TECH TALK** tåler vann, men er ikke vanntett.

Fjern overlegg og avmonter skulderreimen. Tørk overflatene rene med en fuktig fille. Brukt eventuelt et oppvaskmiddel. Tørk av apparatet slik at det blir tørt for å fjerne rester av vann og rengjøringsmiddelet.

Vedlikehold

Hvis **TECH TALK** plutselig ikke virker eller oppfører seg merkelig, skal du følge disse punktene:

1. Kontroller at batteriet er korrekt satt i.
2. Kontroller at apparatet er på og at det er spilt inn noe på beskjedfeltene og at du er på riktig nivå.
3. Se om noe blokkerer kontaktmembranen.
4. Slå av apparatet i 15 sek og prøv å spill av en beskjed.
5. Bytt batterier.