


Talera-32 talemaskin

Brukerveiledning



- helping people

Talera-32 talemaskin

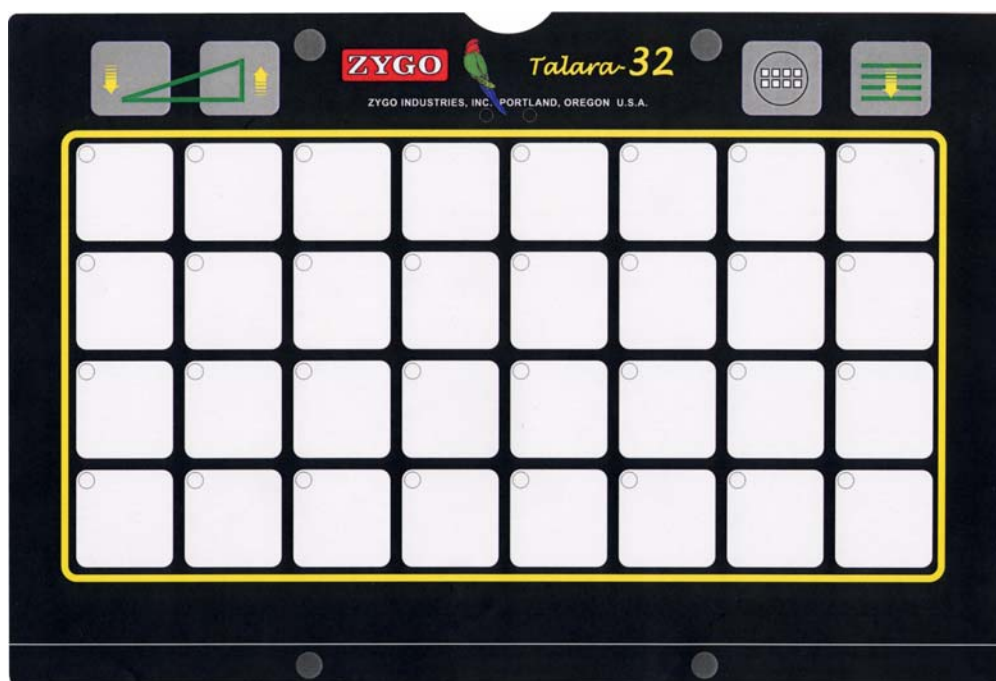


Talera-32 talemaskin:	HMS art. nr. 135590	Art. nr. 111500
Overlegg 8 felter:	HMS art. nr. 136517	Art. nr. 111405
Overlegg 32 felter:	HMS art. nr. 136518	Art. nr. 111410

GEWA AS


Postboks 626, 1411 KOLBOTN
Besøksadresse: Trollåsveien 8
Telefon: 66 99 60 00
Telefax: 66 80 94 90
Teksttelefon: 66 80 93 90
E-post: gewa@gewa.no
Website: www.gewa.no

Skisse med beskrivelse

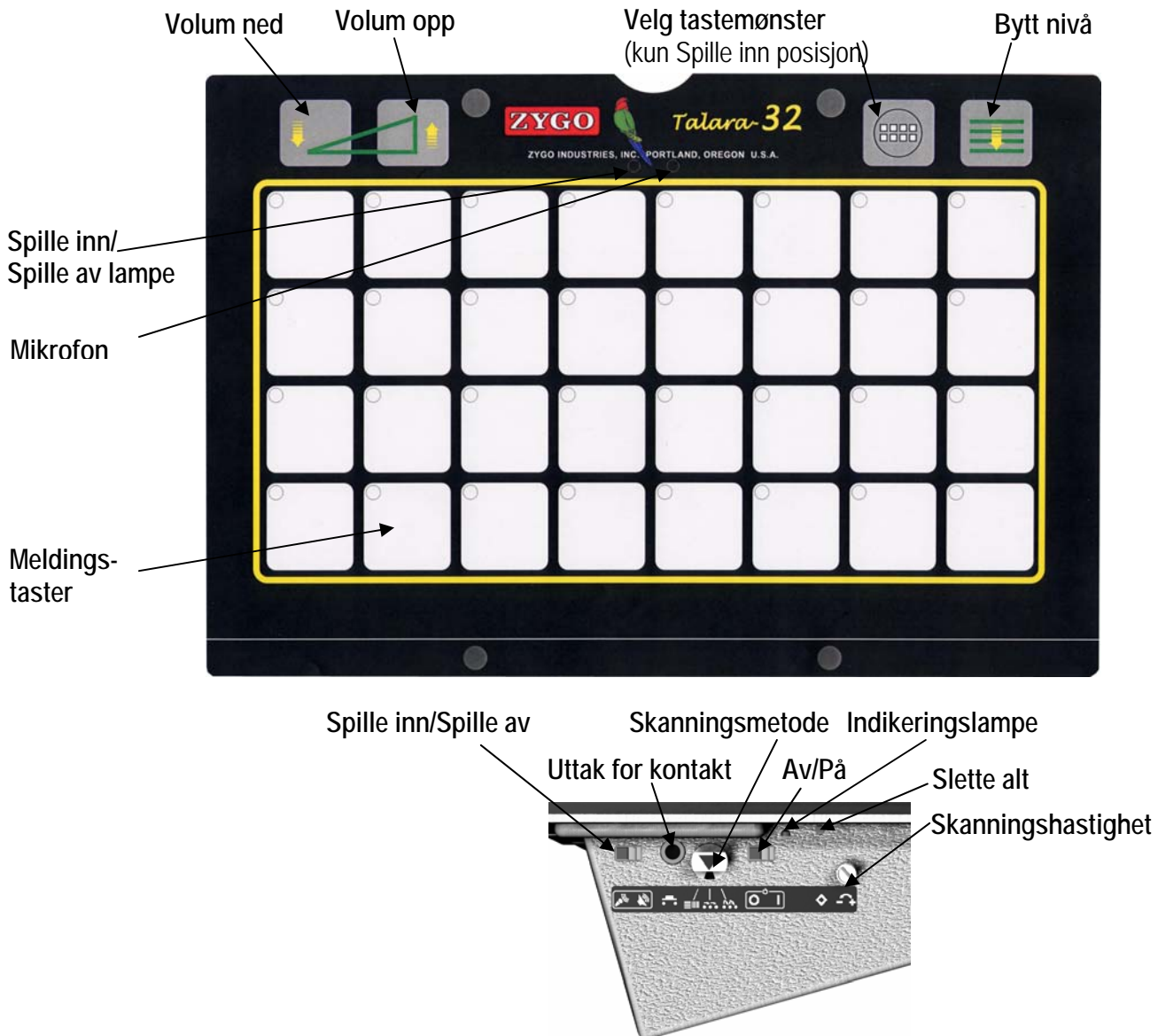

Av/På

For å sette på Talara-32 stilles bryteren Av/På i posisjon På.

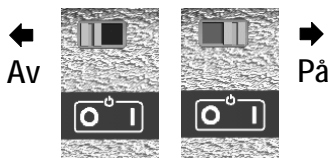

Talara-32 bør slås av under transport og hvis den ikke skal brukes på lenge. Alt som er spilt inn/lest inn vil være lagret i apparatet om det er på eller av, og selv om batteriene er utladet.

Lese inn melding

1. Sett i posisjon *Spille inn*.
2. Trykk og hold meldingstasten nede og snakk i mikrofonen mens Spille inn/Spille av lampen lyser.
3. Sett i posisjon *Spille av*.
4. Trykk på meldingstasten for å lytte på det du har lest inn.

Talara-32 har totalt 45 minutters innspillingstid.

← Spille inn



Spille av →



Spille over

Du kan når som helst spille over en melding.

Innstilling og innspilling i nivåer

Nivåstasten brukes for å vise det aktuelle nivået og for å bytte nivå. Lampene på de fire meldingstastene øverst til venstre brukes for å vise nivåene.


1. Trykk og slipp *Nivåstasten* for å vise aktuelt nivå. Tilsvarende lampe lyser.
2. Mens lampen lyser, trykk på *Nivåstasten* igjen for å bytte til neste nivå.
3. Gjenta for å forflytte deg mellom nivåene.
4. Stopp på ønsket nivå.



Stille inn volumet

Det finnes to volumtaster – *Opp* og *Ned*. Lampene på de åtte øverste meldingstastene brukes for å visa volumet. Tasten lengst til venstre er ikke noe (0) volum og tasten lengst til høyre er maks volum.

1. Trykk og slipp en volumtast for å se aktuell innstilling. Tilsvarende lampe lyser.
2. Mens lampen lyser, trykker man igjen for å endre volumet.
3. Stopp på ønsket volum.

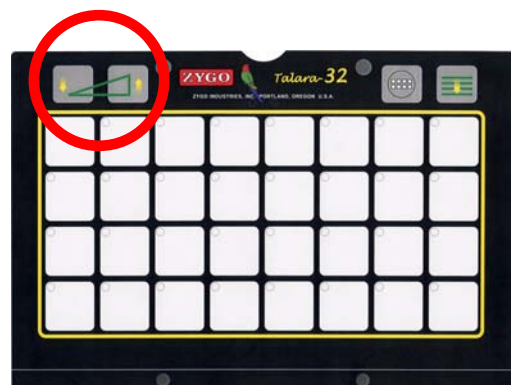

Stille inn tastemønster

Talara-32 innstilles på seks forskjellige tastemønstre: 32-taster, 16-taster, 8-taster, 4-vertikaltaster, 4-horisintaltaster (2 x 2), og 2-taster.

Tastemønsteret kan kun endres i posisjon *Spille inn*.

1. Sett innstillingen i posisjon *Spille inn*.
2. Trykk på tasten *tastemønster* for å se aktuelt tastemønster. (Lampene for tilsvarende tastemønster lyser.)
3. Mens lampen lyser, trykk igjen for å endre tastemønster.
4. Gjenta for å bytte til et annet alternativ.
5. Stopp på ønsket tastemønster.
6. Still inn i posisjon *Spille av*.



For å stoppe avspillingen av en melding trykker man på tasten for tastemønster.


Meldingen i det øverste venstre hjørnet av hver forstørret tast benyttes for hele tasten.

Skanning

Det finnes tre forskjellige skanningsmetoder i Talara-32: *Manuell lineær (Stig og Hold nede)*, *Automatisk lineær*, og *Rad/Kolonne*. Skanningsmetode velges med en bryter. Skanningen slås av ved å stille bryteren utenfor en merket innstilling.

Skanningshastighet for *Manuell lineær Hold nede* og *Automatisk skanning* stilles inn med et lite ratt. Tidsforsinkelse stilles inn automatisk i forhold til skanningshastigheten.

1. Still inn skanningsmetode.
2. Kople til og aktiver en bryter.
3. Still inn ønsket skanningshastighet.

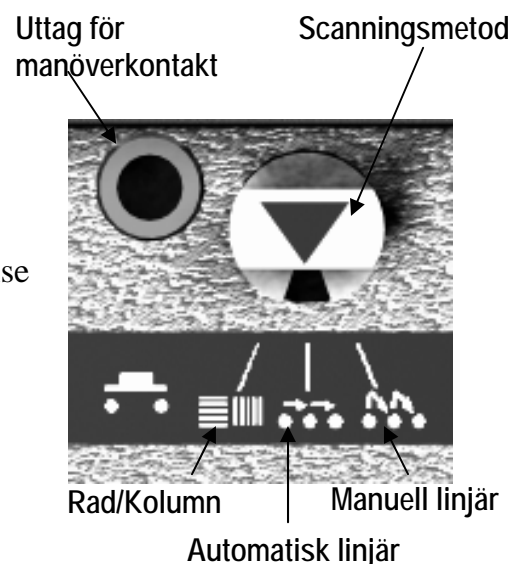

Manuell lineær skanning

Stigning

Hvert trykk på bryteren forflytter lampen til neste tast. Den beveger seg fra venstre til høyre og ovenifra og nedover. Når man stanser, leses meldingen opp etter tidsforsinkelsen.

Hold nede

Hvis man holder bryteren trykket ned, skanner lampen fra venstre til høyre og ovenifra og nedover. Når man slipper bryteren, leses meldingen opp etter en tidsforsinkelse.

Om bryteren aktiveres i løpet av tidsforsinkelsen, blir den ikke aktivert og skanningen fortsetter.

Automatisk lineær skanning

Hvis bryteren aktiveres, vil lampen skanne fra venstre til høyre og ovenifra og nedover. Når den aktiveres igjen kommer meldingen til å bli lest opp etter tidsforsinkelsen.

Om bryteren aktiveres i løpet av tidsforsinkelsen blir ikke noe valg aktivert, men skanningen vil starte på nytt.

Rad/Kolonne skanning

Hvis bryteren aktiveres, vil lampene skanne en rad om gangen, ovenifra og ned. Når den aktiveres neste gang, velges den aktuelle raden og lampen skanner fra venstre til høyre på denne raden. Ved neste trykk på bryteren stopper skanningen og meldingen leses opp etter tidsforsinkelsen.

Om bryteren aktiveres i løpet av tidsforsinkelsen blir ikke noe valg aktivert, men skanningen vil starte på nytt igjen ovenifra.

Ved Rad/Kolonne skanning kan man ikke velge tastaturmønster med 1 eller 2 rader.

Hvis bryteren for skanningsmetode dreies 180° (en halv runde), vil skanningen gå fra høyre til venstre.




Slette alle meldinger

Den nedsenkte knappen benyttes hvis man vil slette alt. Når meldingene først er slettet kan de ikke gjenopprettes.

1. Innstilling i posisjon *Spille inn*.
2. Bruk en tannpirker, en binders eller noe annet spisst til å trykke inn knappen *Slett alt*.
3. **Trykk på knappen i minst 3 sek.** Lampen for Spille inn/Spille av vil blinke for å bekrefte slettingen.
4. Still inn i posisjon *Spille av*.

Slett alt

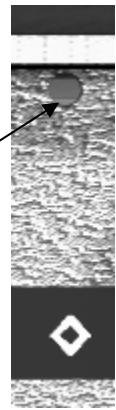

Bytte batterier

Batteriskuffen inneholder fire 1,5V Alkaline batterier LR6. Det er lett å fjerne batteridekslet.

1. Trykk flikene på batteriskuffen mot midten og dra batteridekslet rett ut.
2. Fjern de gamle batteriene og sett inn nye. Pass på at batteriene plasseres riktig, i henhold til anvisninger i batteriskuffen.
3. Pass på at flikene festes ordentlig igjen når batteriskuffen settes på plass.



Batterivarsling

Man vil høre et 5-pip signal når batteriene begynner å bli dårlige, to signaler indikerer veldig dårlige batterier. Lampen på den 11. tasten vil i begge tilfeller lyse. Batteriene bør byttes så snart som mulig. Spill ikke inn nye meldinger med lavt batterinivå.

Man kan med fordel bruke oppladbare batterier.



Tekniske data

Størrelse: 29 x 19 x 1 (cm)

Vekt: 0,8 kg

Trykkraft: Max 115g

Bruksområde: 0 – 45 °C

Rengjøres med en lett fuktet klut som dyppes i vann med litt oppvaskmiddel i.



Gewa AS

Postboks 626, Trollåsveien 8, N-1411 Kolbotn
Tlf.: 66 99 60 00 Telefaks: 66 80 94 90 Teksttlf.: 66 80 93 90
E-post: gewa@gewa.no Hjemmeside: www.gewa.no