

Vuelta avisbladvender

# Bruker- og vedlikeholdsveiledning

**GEWA**

- helping people

## Vuelta avisbladvender



Vuelta avisbladvender

HMS art. nr.: 120550

Bestillingsnr.: 1150060

### INNHOLD

Vuelta avisbladvender.....	1
Generelt .....	2
Montering .....	2
Hvordan plassere en avis i avisholderen.....	3
Ukeaviser – omkopler E stilles i posisjon "V" .....	3
Vedlikehold .....	4
Sikkerhet .....	4


**GEWA AS**

Postboks 626, 1411 KOLBOTN  
Besøksadresse: Trollåsveien 8  
Telefon: 66 99 60 00  
Telefax: 66 80 94 90  
Teksttelefon: 66 80 93 90  
E-post: [gewa@gewa.no](mailto:gewa@gewa.no)  
Website: [www.gewa.no](http://www.gewa.no)

## Generelt

Vuelta er et hjelpemiddel for de som ikke selv klarer å bla i aviser og ukeblader. Det er bare mulig å bla fremover. Ved å aktivere en 1-funksjonsbryter blar Vuelta automatisk ett blad. Alle brytere på markedet med 3,5 mm tilkopplingskontakt kan brukes. Vuelta strømforsynes fra en batterieliminatør som settes i en kontakt for 230 volt.

Blad-mekanismen består av en motordreven "slede" som ved aktivering av bryteren beveger seg fra venstre til høyre og tilbake. Like før sleden når høyre side, senkes den ned slik at et "klebrig hjul" ruller mot avisens nedre høyre hjørne, avissiden fester seg deretter til hjulet og følger med til venstre når sleden går tilbake til sin venstre hvilestilling. Avisen må være plassert slik at det klebrige hjulet slipper og arket legger seg flatt og ikke setter seg fast på støttepinnen.

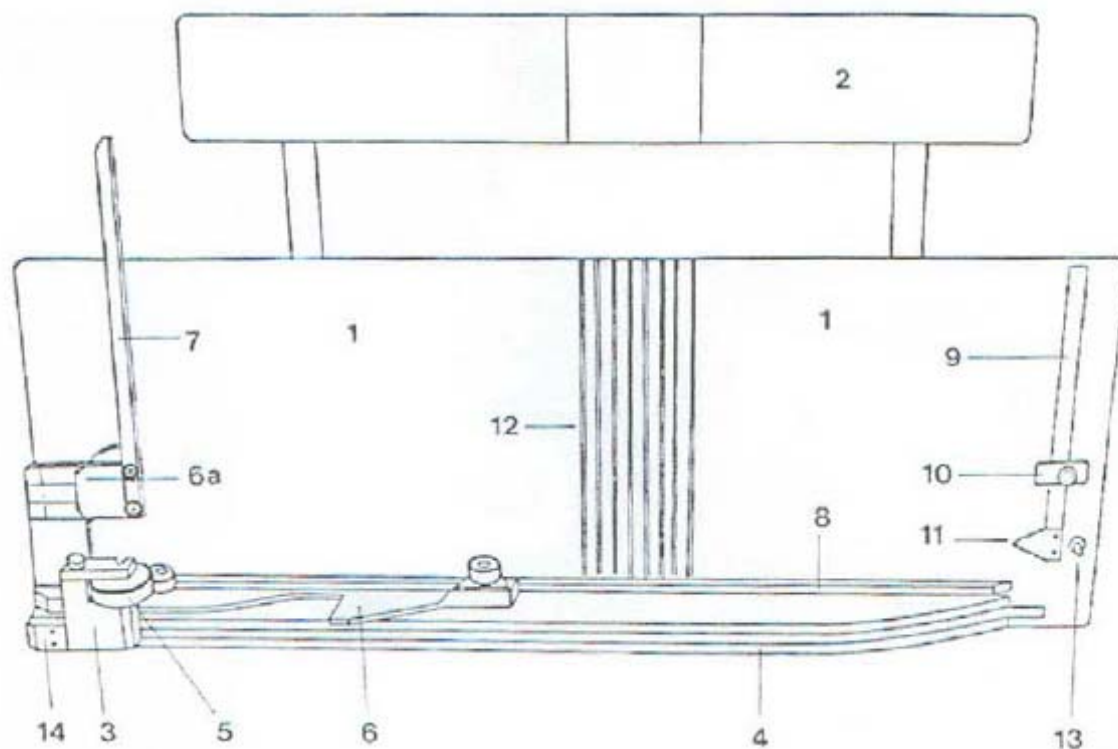


## Montering

Pakk alle delene forsiktig opp av kartongen. Noter alle de forskjellige delene. På venstre side på baksiden av bladvenderen er det en tilkopling for bryter (3,5 mm) og strømforsyning (12V=).

På høyre siden er det to omkopplere. Omkopler E stilles i posisjon dagsavis (D) eller ukeblad (V).

Omkopler D stilles i posisjon for impulsstyring (I) eller styring der bryterne må holdes aktiverte så lenge som bladvenderen skal fungere (H). (Impulsstyring er den vanligste måten å manøvrere på.)

1. Fold ut støttebenet på baksiden av bladvenderen.
2. Plasser bladvenderen på et bord.
3. Sett fast den øvre avisstøtten (2) som vist på figuren.
4. Sett fast støttepinnen (7) på sleden (6a)
5. Sett fast et "klebehjul" på festet (3) ved å løsne skruen.

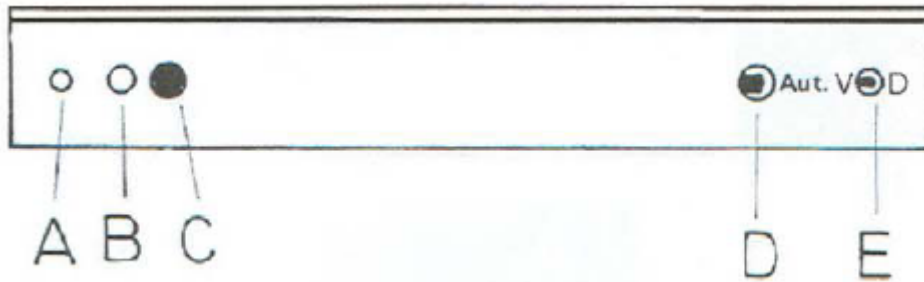

6. Kople bryteren til uttaket (A) på baksiden
7. Kople strømforsyningen til uttaket (B) på baksiden
8. Sett strømforsyningen i et uttak for 230 volt (220)

## Hvordan plassere en avis i avisholderen

Alle aviser må settes fast i den holderen som følger med. Holderen er en 60 cm lang, U-format aluminiumsprofil med en messingstang.

Gjør som følger:

1. Legg avisen på et bord og brett den opp på midten.
2. Ryggen føres så inn i holderen slik at messingstangen klemmer fast avisen.
3. Sett holderen fast i ett av sporene (12).  
NB! Ved storformat er det viktig at holderen sitter i det 2. sporet fra venstre. Ved f.eks. tabloidformat (VG, Dagbladet m.m.) skal ikke holderen benyttes.
4. Sett holderen slik at messingstangen låses fast innenfor den nedre **svarte** listen.
5. Fest siste arket med skruen (10)
6. Bla til side 1 slik at du kan lese førstesiden på lesebordet.
7. Ta alle arkene og "fest" dem under plexiglass-fliken (11)
8. Slå på strømbryteren (13) – en rød lysdiode indikerer at strømforsyningen fungerer.

Det er klart til å bla ett ark – trykk på bryteren i ca. 0,5 sekunder og slipp. Sleden skal nå bevege seg fra venstre til høyre, klebehjulet skal gå ned og feste arket, ta det med seg til venstre for deretter å slippe arket og stoppe i sluttposisjon. Hver bryterimpuls blar ett ark. Siste siden (baksiden) på avisen kan ikke leses/blas (hvis ikke skruen (10) løsnes.

## Ukeblader – omkopler E stilles i posisjon "V"

Ukeblader settes fast på lesebordet ved at den siste siden festes med skruen (10). De øvrige arkene settes inn under plexiglass-fliken (11). Det er viktig at omkopler "E" står i posisjon "V". Bruk det "smale" klebehjulet.

## Vedlikehold

Vuelta's viktigste del er klebehjulet. Det følger med tre forskjellige hjul; med lite, middels og bredt belegg. Belegget er av samme slag som det som er på ruller til å ta bort lo fra klærne. Når man har brukt et hjul lenge, må det gjøres rent for trykksverte.  Dette gjøres forsiktig med lunkent såpevann. Klebehjulet kan også leveres som reservedel.

Det smale klebehjulet til ukeblader med glanset papir som har stor festeevne, mens de med bredere overflate brukes til større aviser med dårligere papirkvalitet. Man bør prøve seg frem for å se hvilket som passer til det man vil lese/bla i.

## Sikkerhet

Vuelta drives med lav spenning (12V=) og har derfor ingen detaljer som kan forårsake skade. Motoren som driver sleden har en automatisk overopphetingsbeskyttelse som trer i funksjon hvis noen bevegelige deler blir blokkert. Hvis en del blir blokkert, så slå av strømbryteren (13), rett opp feilen og sett den på igjen. Om en elektrisk feil oppstår skal sikringen "C" bli utløst.

