

Readable bladvender

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

GEWA

- helping people




INNHALDSFORTEGNELSE

Readable bladvender.....	1
1. Deler til Readable.....	2
2. Hvordan sette inn en bok.....	4
3. Å arbeide med Readable	8
3.1. Manuell betjening ved hjelp av IR fjernkontroll.....	8
3.2. Skanning.....	10
4. Tips.....	11

GEWA AS


Postboks 626, 1411 KOLBOTN
Besøksadresse: Trollåsveien 8
Telefon: 66 99 60 00
Telefax: 66 80 94 90
Teksttelefon: 66 80 93 90
E-post: gewa@gewa.no
Website: www.gewa.no

1. Deler til Readable

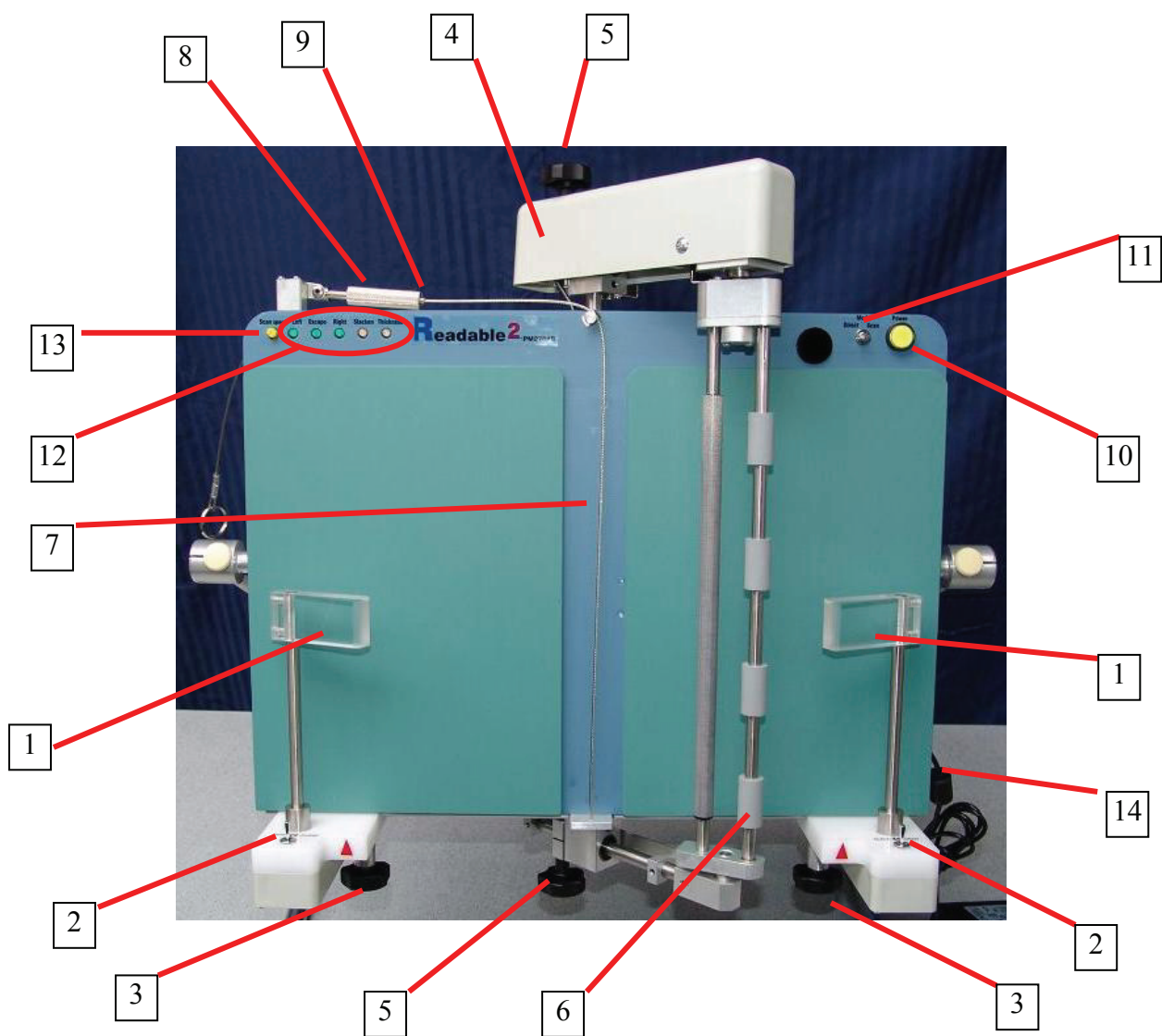



15

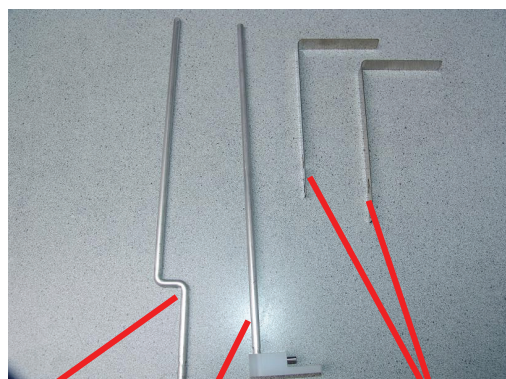

16a

16b

16c

1. Feste-enhet
2. Bryter for å åpne/lukke feste-enheten
3. Justeringsratt til å feste/løsne feste-enheten
4. Vende-enhet
5. Justeringsskrue til å feste/løsne vende-enheten
6. Dobbel valse
7. Kabel
8. Kabelfeste
9. Justeringsskrue til kabelen
10. På/Av knapp
11. Bryter for å velge metode (direkte eller skanning)
12. Lamper til skanningsmodulen
13. Gul bryter til å regulere skanningshastigheten
14. Strøminngang
15. Adapter
16. Tilbehør for større bøker

2. Hvordan sette inn en bok

Dette er den viktigste informasjonen når det gjelder hvordan Readable skal brukes. Hvis boken blir satt inn riktig, kan brukeren håndtere Readable uten noen problemer. Vi råder deg derfor til å bruke tid på å lese disse instruksjonene nøye.

1. Plassér Readable i vertikal posisjon (det gjør innstillingen/justeringen enklere).



2. Kople til adapteren og slå på Readable ved å trykke på "På/Av knappen" (10)



Denne knappen vil lyse grønt hvis strømforsyningen er tilkoplest strømnettet.

3. Åpne de to "Feste-enhetene" (1) ved å holde tilsvarende "Bryter for å åpne/lukke feste-enheten" (2) i posisjon "Åpen" i noen sekunder.




Det er ikke nødvendig å åpne feste-enhetene maksimalt.


4. Løsne" Justeringsratt til å feste/løsne feste-enheten" (3) på begge enhetene litt og beveg dem lengst mulig mot sidene av Readable (slik at du får mer plass når du skal sette inn en bok).




5. Løsne litt på “Justeringskrue til å feste/løsne vende-enheten” (5) på toppen og bunnen, og skyv valsene så langt som mulig bort fra Readable.

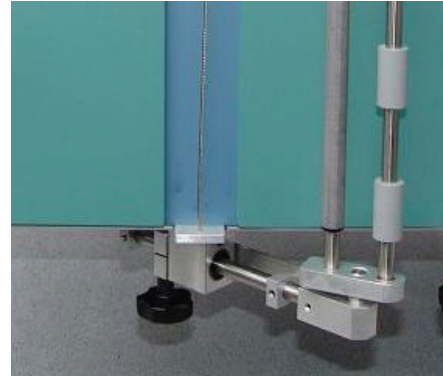


6. Løsne “Kabeljusteringen” (8) og ta ut kabelen ved samtidig å trykke på og vippe opp “Justeringskrue til kabelen” (9).

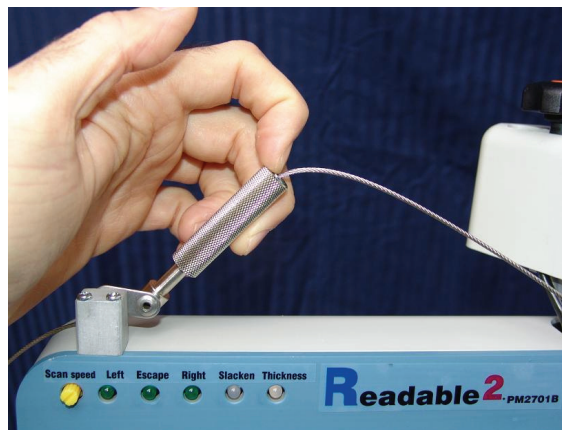

7. Hold boken i hånden som vist på bildet under og sett den inn i Readable. Vær sikker på at “Kabelen” (7) plasseres på midten av boka. Boka skal hvile på den lille metallstøtten nederst.

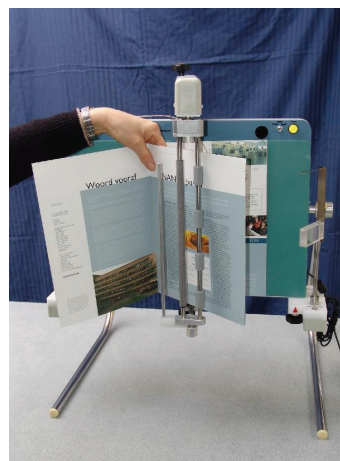


8. Fest "Kabelen" (7) for å være sikker på at boken er plassert riktig. Ved å dreie på "Kabeljusteringen" (8) kan du stramme kabelen og sikre deg at boken blir stående der den skal.
9. Beveg "Feste-enheten" (1) tilbake til midten på Readable så langt at spissen av den røde trekanten er ved enden/ytterkanten av boken (se fig. nedenfor).

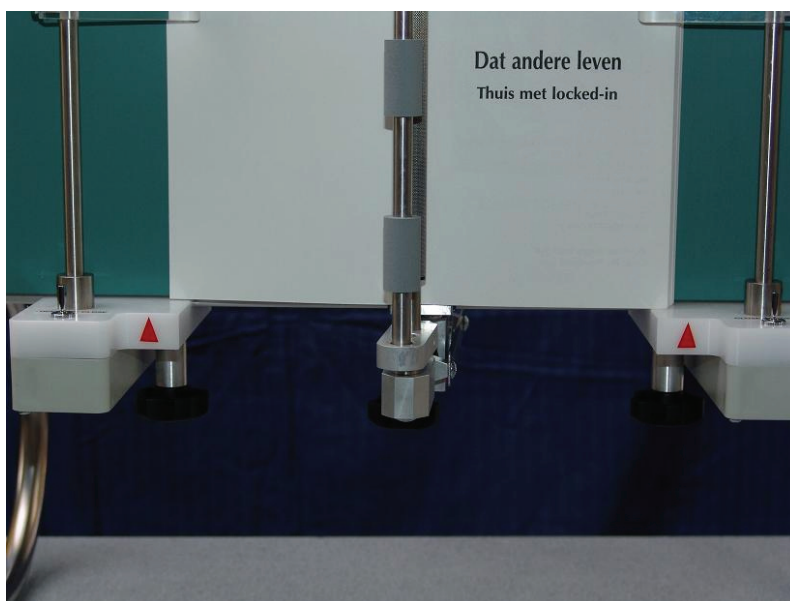

Fest "Justeringsratt til å feste/løsne feste-enheten" (3) på hver av feste-enhetene. Trykk på "Bryter for å åpne/lukke feste-enheten" (2) for å lukke feste-enhetene. Hold bryteren i denne posisjonen til feste-enhetene er helt lukket og har sluttet å bevege seg.

10. Skyv "Vende-enheten" (4) tilbake mot Readable til du har en avstand på ± 1.5 cm mellom valsen og boken. Fest så "Justeringskrue til å feste/løsne vende-enheten" (5) oppe og nede.

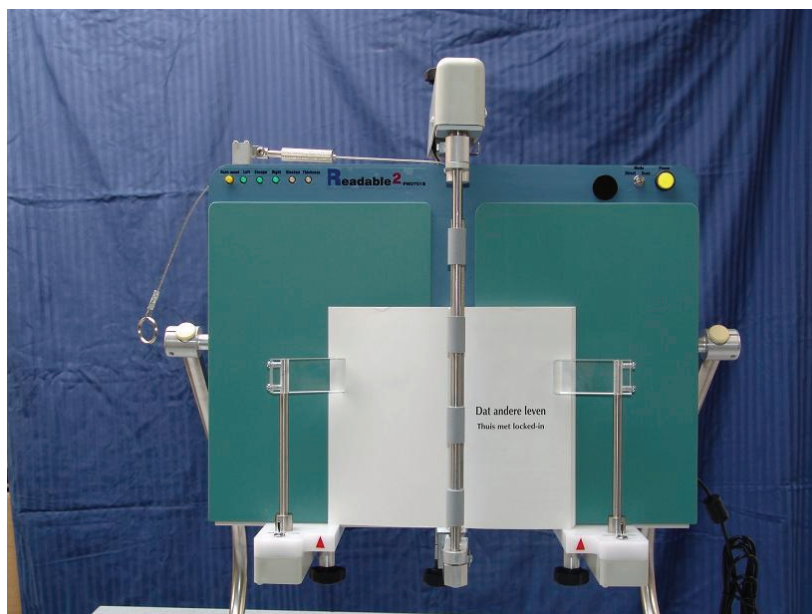

3. Å arbeide med Readable

3.1. Manuell betjening ved hjelp av IR fjernkontroll


Vær sikker på at ”Bryter for å velge metode (direkte eller skanning)” (11) er i posisjon ”Direct” (direkte). Hvis den ikke er det, må du skru av utstyret ved å trykke på ”På/Av knappen” (10). Sett ”Bryter for å velge metode” (11) i posisjon ”Direct” og skru på utstyret igjen.



På fjernkontrollen til Readable finner du følgende knapper:

1. **Power** (Strøm): Med denne knappen setter du utstyret i Stand-by posisjon. Med denne knappen er Readable **IKKE** slått helt av. Det er bare mulig manuelt ved å trykke på ”På/Av knappen” (10) på Readable.
2. **Right** (Høyre): Denne brukes for å bla en side som står på høyresiden til venstre.
3. **Left** (Venstre): Denne blir brukt for å bla en side som står på venstresiden til høyre.
4. **Escape**: For å bevege ”Vende-enheten” (4) fra venstre til høyre eller omvendt uten å bla noen sider. Etter å ha bladd en side, avhengig av hvilken retning siden har blitt bladd, vil ”Vende-enheten” stoppe opp over den venstre eller høyre siden. Du kan bruke denne funksjonen for å bevege ”Vende-enheten” til den andre siden og lese siden som er under ”Vende-enheten”.
5. **Thickness** (Tykkelse): Hvis du blar i en bok med veldig glatt eller tykt papir, er det mulig at valsene på ”Vende-enheten” vil glippe/skli og ikke klare å bla om sidene. Ved å aktivere denne Thickness-funksjonen vil ”Vende-enheten” presse hardere på siden mens den blar. På denne måten kan Readable, nesten alltid, klare å bla om sidene.
Når denne funksjonen er aktivert vil den røde lampen ”Thickness” (Tykkelse) lyse oppe i venstre hjørne av Readable. Trykk på knappen en gang til for å deaktivere denne funksjonen.

6. **Slacken (Løsne):** Denne funksjonen er mest nødvendig når du leser en liten, men tykk bok. Denne funksjonen / dette valget gjør det mulig å bla om sidene uten de blir flattrukte når de er bladd om (se bildet nedenfor).

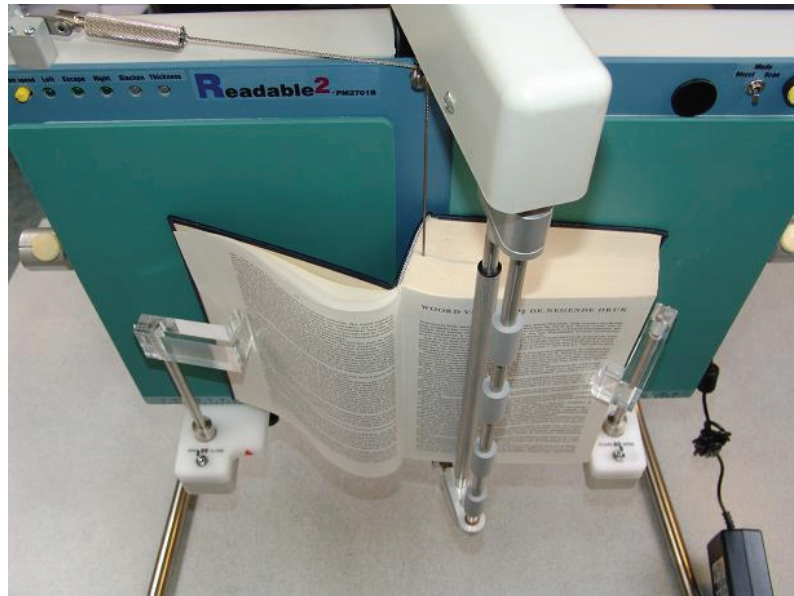

Ved å aktivere denne funksjonen vil Readable rette ut sidene som buer seg utover. Når denne funksjonen er aktivert, vil den røde lampen “Slacken” (Løsne) lyse oppe i venstre hjørne av Readable. Trykk en gang til på denne knappen hvis du vil deaktivere denne funksjonen.

3.2. Skanning

Hvis du har problemer med å trykke på knappene på fjernkontrollen til Readable, kan du bruke det innebygde skanningen i utstyret. Kople til en 1-funksjonsbryter på venstre side av fjernkontrollen til Readable. Det finnes mange forskjellige 1-funksjonsbrytere å velge mellom. Ta kontakt med Gewa AS (tlf. 66 99 60 00) hvis du ønsker mer informasjon om disse bryterne.

Oppe i venstre hjørne på Readable ser du fem “Lamper til skanningsmodulen” (12). Hver lampe har en tilhørende funksjon som står skrevet over hver enkelt lampe. For å få en mer detaljert forklaring på disse funksjonene, se avsnitt 3.2. “Manuell betjening ved hjelp av IR fjernkontroll”.



1. Pass på at “Bryter for å velge metode (direkte eller skanning)” (11) står i posisjon “Scan” (=Skanning). Hvis den ikke er det, så slå av utstyret ved å trykke på “På/Av knapp” (10). Sett ”Bryter for å velge metode” (11) i posisjon “Scan” og slå utstyret på igjen.
2. Du kan regulere skanningshastigheten ved å skru på “Gul bryter til å regulere skanningshastigheten” (13).
3. Du aktiverer en funksjon ved å trykke på 1-funksjonsbryteren samtidig som lampen som har ønsket funksjon lyser opp.

4. Tips

1. Bruk **IKKE** funksjonene “Thickness” (=Tykkelse) eller “Slacken” (=Løsne) uten at det er nødvendig.
Hvis du bruker funksjonen “Thickness” til en bok med “normalt” papir, kan det hende at Readable blar om to sider samtidig.
Hvis du bruker “Slacken” hvis det ikke er nødvendig, er det mulig at boken i sin helhet blir flyttet til høyre eller venstre og at en feste-enheten mister grepet på boken.
2. I skanningsmodus kan du blokkere for funksjonene “Thickness” og “Slacken”. Hold 1-funksjonsbryteren trykket ned i ca. 3 sekunder mens “Escape” lampen lyser. Når du så slipper 1-funksjonsbryteren, vil du se at skanningen ikke lenger går innom disse to funksjonene. For å gjøre disse to funksjonene tilgjengelige igjen, må du holde 1-funksjonsbryteren trykket ned i ca. 3 sekunder mens “Escape” lampen lyser opp. Det er **IKKE** mulig å blokkere disse to funksjonene ved innstillingen “Direct”.
3. Bruk “Tilbehør for større bøker” (16) når du leser bøker som er større enn A5. Når du leser mindre bøker, må du fjerne dette tilbehøret.



Hvis du prøver å bla om større sider med større formater enn A5 uten dette tilbehøret, er det mulig at sidene blir blokkert mellom valsene på "Vende-enheten". Hvis dette skjer, vil "Vende-enheten" fortsette å vende i ca. 15 sekunder. Hvis sidene forblir blokkert mellom valsene, går Readable inn i Alarm-modus. Readable slutter å fungere og de 5 skanningslampene vil blinke. For å stille inn Readable på nytt, må du slå den av ved å bruke "På/Av knappen" (10). Det er **IKKE** mulig å stille inn Readable på nytt ved å bruke knappen på fjernkontrollen.

Når du leser en bok eller et ukeblad i A4-format, kan det hende at hjørnene på sidene vil bøye seg nedover, spesielt hvis du vipper Readable over for å lese en bok på sengen. Bruk tilleggsutstyr 16c for å holde hjørnene på plass. Bare skyv dem over "Feste-enheten" (1).

4. Rotasjonen på "Vende-enheten" er ikke kraftig. Dette er en innebygd sikkerhetsregel for å unngå at en side blir revet i stykker hvis den sitter fast i "Vende-enheten" (5).